

Instrumentvärmare

[SF 12 33 50]

Material: Rostfritt stål
Yttermått: 530 x 325 mm
Värmekälla: Värmekabel
Driftspänning: 230 V AC 12.0 V AC Sekundär
S/CE-märkt transformator av plug-in typ.

Uppfyller kraven EN 60 335-1, SS-EN 60 601:91, Am SS EN 60 601-1
Maxbelastning: 20 VA.

Bruksanvisning:

Avlägsna plasten på brickan.

Anslut värmebordets DIN-kontakt till transformatorn som i sin tur anslutes till 230 V.

Vrid på sladdströmbrytaren. En grön lysdiod markerar att strömmen är sluten.

Då det tar ca 30 minuter innan värmebordet uppnått rätt temperatur bör det påkopplas vid arbetsdagens början och sedan vara inkopplat hela dagen.

Instrumenten skall läggas på en bomullsduk på värmebordet och sedan skall duken vikas över instrumenten för att bibehålla värmen.

Rengöring:

Vid behov, torka av värmebordet med en i vatten eller M-sprit fuktad trasa. Sänk inte ned värmebordet i sin helhet i vatten. Elektronik kan då skadas.

Obs! Endast medföljande transformator med modell no: AEN 542202 får användas till denna värmebord. Undvik att dra DIN-kontakten ur transformatorn då värmebordet är påkopplat och transformatorn är ansluten till 230 V. Risk för gnistbildning.

