

Instrumentvärmare

[SF 12 33 51]

Material: Eloxerad aluminium
Yttermått: höjd 100, diameter 100 mm
Värmekälla: Effektmotstånd
Driftspänning: 230 V AC 12.0 V AC Sekundär
S/CE-märkt transformator av plug-in typ.
Maxbelastning: 20 VA.

Bruksanvisning

Anslut spegelvärmarens DIN-kontakt till transformatorn som i sin tur anslutes till 230 V.

Vrid på sladdströmbrytaren. En grön lysdiod markerar att strömmen är sluten. Då det tar ca 30 minuter innan värmaren uppnått rätt temperatur bör det påkopplas vid arbetsdagens början och sedan vara inkopplad hela dagen.

Rengöring:

Vid behov, torka av spegelvärmaren med en i vatten eller M-sprit fuktad trasa. Sänk inte ned spegelvärmaren i sin helhet i vatten. Elektroniken kan då skadas.

Obs!

Endast medföljande transformator med modell no: AEN 542202 får användas till denna värmare. Undvik att dra DIN-kontakten ur transformatorn då spegelvärmaren är påkopplad och transformatorn är ansluten till 230 V. Risk för gnistbildning.

